




Inhalt

Pädiatrie



1x Abstrichtupfer Nasen-Rachenraum

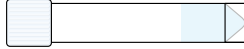

1x Probenröhrchen

Durchführung des Abstriches

1 Probenabnahme

Bei Kindern ist der Nasen-Rachenraum-Abstrich zu bevorzugen.

Mindestens 2x rotieren, den Abstrich zurückziehen. Abstrichtupfer in das Probenröhrchen einführen und mit der Schere abschneiden. Probenröhrchen fest verschliessen.

2 Probenröhrchen aussen mit Alkohol / Desinfektionsmittel desinfizieren.

3 Probenröhrchen mit Patientendaten beschriften.

4 Auftragsformular Coronavirus SARS-CoV-2 ausfüllen – Die Analyse, Entnahmestelle und vom BAG geforderte Fallkonstellation müssen zwingend ausgefüllt werden. Für Praxen mit elektronischer Auftragserteilung kann der Test auch online beauftragt werden.

5 Probenröhrchen in Versandtüte verpacken.