




## Inhalt

**Ebenfalls geeignet für  
Influenza A/B und RSV A/B**

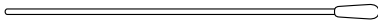

**1x Abstrichtupfer für Mund-Rachenraum\***



**1x Probenröhrchen mit Virus-Transportmedium**



**1x Versandbehälter mit Vlieseinlage**

## Durchführung des Abstriches

### **1 Probenabnahme aus Mund-Rachenraum\***

Mindestens 2x rotieren und den Abstrich zurückziehen.

Den Abstrichtupfer in das Probenröhrchen einführen und Abstrichtupfer aus...

...Kunststoff mit der Schere abschneiden.

...Holz über Probenröhrchen-Rand abbrechen.

**Probenröhrchen anschliessend fest verschliessen.**

### **2 Probenröhrchen aussen mit Alkohol/Desinfektionsmittel desinfizieren**

### **3 Probenröhrchen mit Patientendaten beschriften**

**4 Auftragsformular Mikrobiologie** ausfüllen und von Hand «Coronavirus» bei «Weitere Analyse» vermerken. Für Praxen mit elektronischer Auftragserteilung kann der Test auch online beauftragt werden. Zudem «Krankheit», «Anordnung Kantonsarzt» oder «Wunsch Patient» zusätzlich auf dem Auftragsformular vermerken (korrekte Verrechnung siehe Informationen Diagnostik).

**5 Probenröhrchen in Versandbehälter mit Fliesseinlage überführen** und in Versandtüte verpacken.

\* Neueste Studien haben bewiesen, dass der Mund-Rachenraum- und Nasen-Rachenraum-Abstrich für die molekulare Diagnostik von SARS-CoV-2 gleichwertig sind. Literatur auf Wunsch erhältlich.