





Positionierung der Langzeit EKG Elektroden

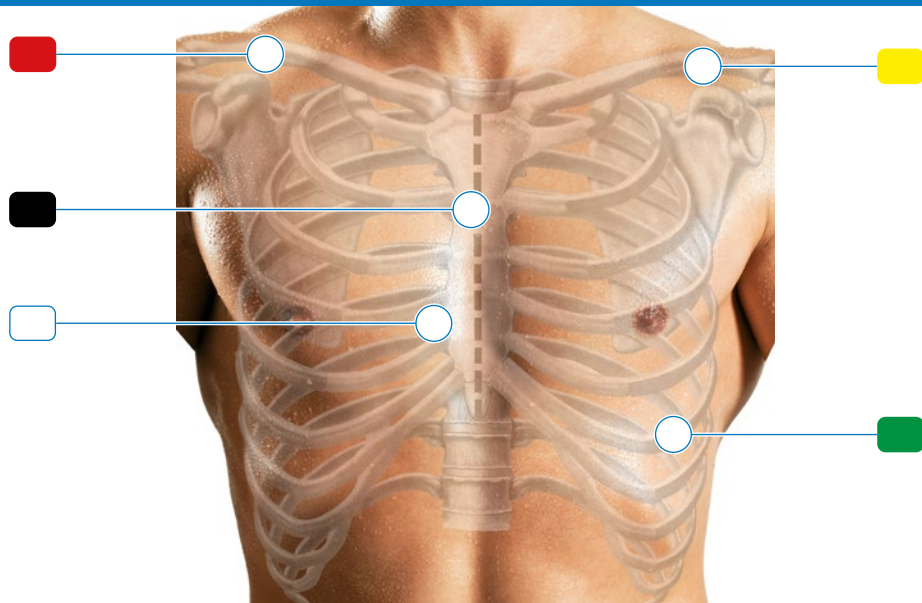

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Rechte Clavicula |  | Linke Clavicula |
|  | Referenz oder Erdleitung |  | Linke Seite unterhalb der Rippenbögen |
|  | Praecardiale Ableitung | | |

WICHTIG!

- » Das EKG-Gerät darf **nicht geöffnet** werden.
- » Auf den Elektroden sollte **kein Zug** sein.
- » Die Kabel **nicht knicken**.
- » Mit dem EKG-Gerät darf **nicht geduscht oder gebadet** werden.
- » Mit dem EKG-Gerät **sorgsam umgehen**.

Einstellen des H3+ Holter

Start der Überwachung


- 1 Entfernen Sie die **Batterieabdeckung** vom H3+ Rekorder, legen Sie eine neue **AAA-Batterie** ein und schliessen Sie die Abdeckung wieder.




- 2 Mit der **Enter-Taste** wechseln Sie die Menüanzeige.



» Überprüfen Sie die aktuelle **Zeit**.

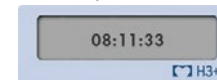

» Überprüfen Sie die **ID-Nummer**.

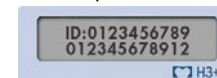


» Überprüfen Sie die **Signalqualität**.




- 3 Zum Beginn der Aufzeichnung drücken und halten Sie die **Enter-Taste** für 3 Sekunden. Ein **R*** zeigt den Aufnahme-modus an.

***R** = Recording = Aufnahme

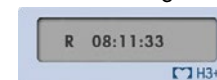

Optionale Patientenmarkierung

Ein Ereignis können Sie mit der Enter-Taste markieren. Ein **↓** zeigt an, dass z.Zt. kein neues Ergebnis markiert werden kann.

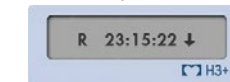

Beenden der Aufzeichnung

- 1 Öffnen Sie das **Batteriefach**.
- 2 Entfernen Sie die Batterie.
- 3 Entsorgen Sie die entfernte Batterie ordnungsgemäss.
- 4 Schliessen Sie das Batteriefach.

FRAGEN?

Unter der Telefonnummer **044 250 50 50** helfen wir Ihnen gerne weiter.