


### Inhalt



**1x EDTA-Röhrchen**

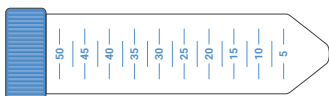

**1x Steriler konischer Versandbehälter,  
Inhalt 50 ml ( TM 1)**

**Für Zellzahl, Kristalle, Kultur, PCR**  
(auch für Pleura- oder Ascitespunktat geeignet)

### Vorgehen

- 1 EDTA-Röhrchen** mit rotem Deckel für die Zellzahl.  
Zur Vermeidung von Zellveränderungen sollte die Bestimmung der Zellzahl **am gleichen Tag** durchgeführt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten in der Praxis zusätzlich **Ausstriche angefertigt werden** (analog Blutbilder).
- 2 Steriler konischer Versandbehälter, Inhalt 50 ml ( TM 1)**  
Für bakteriologische Untersuchungen, Kristalle, klinisch-chemische Untersuchungen und diverse Erreger-DNA-Nachweise ( PCR ).