




Inhalt

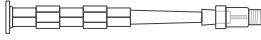

1x Biopsy Punch
steril für Hautbiopsie



1x Transportmedium

Für Borreliennachweis aus EM
(*Erythema Migrans*)

Vorgehen

- 1 Haut mit 70% Alkohol desinfizieren (*jodhaltige Mittel vermeiden*).
- 2 Entnahmebereich straffen.
- 3 Biopsy Punch aufdrücken.
- 4 Mittels rotierender Bewegung Biopsie ausstanzen.
- 5 Biopsie mit Pinzette aus der Stanze entnehmen und ins Transportmedium überführen.