

24H BLUTDRUCKMESSUNG – ANLEITUNG FÜR DIE PRAXIS

Inhalt 24h-BD Box

- Blutdruckgerät Mobil-O-Graph inkl. 2 AA-Akkubatterien
- Je 1 Manschette der Grössen S, M, L und XL
- Tragetasche mit verstellbarem Gurt
- Textilstrumpf für Oberarm
- Bestellformular, Ablauf für die Praxis, Anleitung 24h-Blutdruck, Patienten-Tagebuch und wichtige Hinweise für den Patienten
- Analytica Adressdeckblatt

Start der Aufzeichnung

- 1 Messen Sie den Oberarmumfang des linken Armes beim Patienten mit einem Massband und legen Sie die passende Manschette an (Tabelle auf der Rückseite).
- 2 Prüfen Sie den korrekten Sitz der Manschette:
 - Beiliegenden Textilstrumpf für den Oberarm anziehen.
 - Die Manschette etwa zwei Finger breit oberhalb der Ellenbeuge anlegen, mit dem Schlauch-Ausgang nach oben. Darauf achten, dass der Schlauch nicht geknickt werden kann.
 - Das Arteriensymbol muss unbedingt auf der Arteria brachialis liegen.
 - Die Manschette relativ eng anlegen. Ein Finger soll sich unter die Manschette einführen lassen.
- 3 Rekorder in die vorgesehene Tasche legen und verschliessen.
- 4 Manschette und Schlauchverlängerung zusammenführen und mit dem Rekorder verbinden. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse sicher sitzen.
- 5 Schalten Sie den Rekorder ein (An/Aus Schalter).
Um die 24h-Messung zu starten, muss eine erfolgreiche manuelle Messung durchgeführt werden (keine Fehlermeldung). Drücken Sie dafür die Start-Taste.
- 6 Befragen Sie den Patienten im Anschluss an die manuelle Messung nach möglichen Problemen (z. B. zu fester Sitz der Manschette). Korrigieren Sie gegebenenfalls deren Ursache.
- 7 Informieren Sie den Patienten über die Wichtigkeit, das Patienten-Tagebuch auszufüllen und geben Sie ihm das beiliegende Merkblatt «Wichtige Hinweise für den Patienten» ab.
- 8 Warten Sie die erste automatische Messung ab. Wenn alles in Ordnung ist, kann der Patient gehen.

SIE HABEN FRAGEN ZUM ABLAUF ODER ZU UNSEREN GERÄTEN?

Dann rufen Sie **044 250 50 50** an und verlangen Sie unseren **Praxissupport!**

Messintervall

Am Tag (07.00 Uhr – 22.00 Uhr): alle 20 Minuten
In der Nacht (22.00 Uhr – 07.00 Uhr): alle 60 Minuten

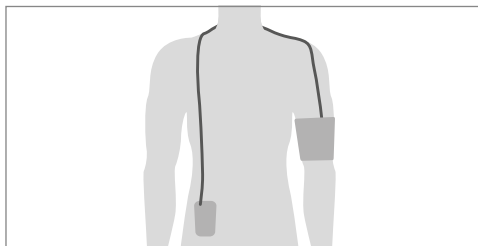
Ende der Aufzeichnung

- 1 Schalten Sie den Rekorder aus (An/Aus Schalter).
- 2 Nehmen Sie dem Patienten die Manschette ab und entfernen Sie die Verbindung der Manschette vom Rekorder (Metallring leicht vom Rekorder wegziehen, nicht drehen).
- 3 Legen Sie alles Material zurück in die Box, verwenden Sie das Analytica Adressdeckblatt und geben Sie die Box unserem Kurier mit.




Manschettengrößen

Oberarmumfang	Manschette
20 – 24 cm	S
24 – 32 cm	M
32 – 38 cm	L
38 – 55 cm	XL

Sitz der Manschette von vorne



Geräteschalter

An/Aus Schalter	
Starttaste	
Ereignistaste	

SIE HABEN FRAGEN ZUM ABLAUF ODER ZU UNSEREN GERÄTEN?

Dann rufen Sie **044 250 50 50** an und verlangen Sie unseren **Praxissupport!**