


## Inhalt

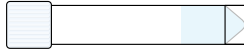

**1x Abstrichtupfer Nasen-Rachenraum**



**1x Probenröhrchen**

## Durchführung des Abstriches

### 1 Probenabnahme

Abstrichtupfer über die Nase ca. 7 cm bis zur Rachenwand einführen, mindestens 2x rotieren und dann zurückziehen. Den Abstrichtupfer in das Probenröhrchen einführen und abknicken. Probenröhrchen fest verschliessen.

### 2 Probenröhrchen aussen mit Alkohol / Desinfektionsmittel desinfizieren.

### 3 Probenröhrchen mit Patientendaten beschriften.

4 **Auftragsformular Coronavirus SARS-CoV-2** ausfüllen – Die Analyse, Entnahmestelle und **vom BAG geforderte Fallkonstellation müssen zwingend ausgefüllt werden.** Für Praxen mit elektronischer Auftragserteilung kann der Test auch online beauftragt werden.

### 5 Probenröhrchen in Versandtüte verpacken.